

# schreiben Sie noch oder medikettieren Sie schon ?

80 % Zeitersparnis beim Kennzeichnen  
Ihres Sterilguts



100 % ige Sicherheit bei der Chargen-  
Dokumentation

# medikett

labeler

schnell • sicher • einfach • rückverfolgbar

Nach den neuen Hygienevorschriften besteht im Rahmen der Chargendokumentation bei jedem chirurgischen Eingriff die Beweispflicht für die Anwendung steriler Instrumente. Üblicherweise müssen hierzu die Steril-Verpackungen mit den wichtigsten Daten handschriftlich gekennzeichnet werden, und diese Daten müssen dann - ebenfalls handschriftlich - in die Patientenakte übertragen werden. Die handschriftliche Kennzeichnung der Instrumente vor dem Sterilisieren ist zeitraubend, mühsam und nicht selten fehlerbehaftet. **medikett** spart Zeit und ist sicher.

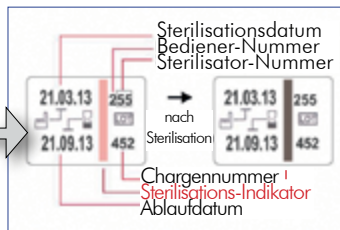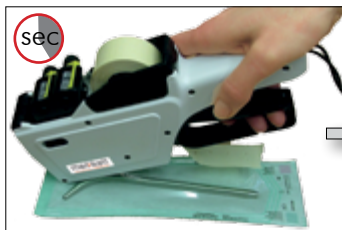

Mit dem neuen **medikett** Labeler dauert das Beschriften eines Instruments weniger als 1/2 Sekunde: Einfach die Printtaste drücken und sanft über die Verpackung streichen schon ist das Instrument etikettiert mit Sterilisations-

Verfalldatum, der Chargennummer, Seriennummer und dem Zeichen des Verantwortlichen. Der Sicherheitsstreifen zeigt durch Verfärbung an, dass das Instrument bereits sterilisiert wurde.

Die **mediketten** sind doppelt selbstklebend und lassen sich dadurch nach dem Gebrauch des Instruments problemlos von der Verpackung abnehmen und in die Behandlungskarte einkleben.

Anhand der Chargennummer kann im Sterilisator-Protokoll der Sterilisations-Vorgang verifiziert werden. **medikett**ieren erleichtert und vereinfacht die manuelle Chargendokumentation und ermöglicht die Chargen-Rückverfolgbarkeit.